

	Model / Modèle					
	1	2	3	4	5	6
Plug (diam. in mm) Prise (diam. en mm)	2.5		3.5	3.5	2.5	2.5
Micro Micro	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Left hook Boucle gauche	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Right hook Boucle droite			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Earpiece Ecouteur				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

The models 3 and 4 are compatibles with MP3 audio player, audio CD player, PC ...

The models 1, 5 and 6 are compatibles with telephones.

Les modèles 3 et 4 sont compatibles avec une source audio type MP3, lecteur CD, PC ...

Les modèles 1, 5 et 6 sont compatibles avec les téléphones.

**GB**

## USING

- Connect the CL Hook plug (2.5 or 3.5mm) to the headphone socket of your audio device.
- Place the nylon hook(s) behind your ear.
- Switch your hearing aid to T mode.
- Your system is now ready to be used.

### Note :

The models 1, 5 and 6 include a microphone for using with a telephone in hands free mode.

- To turn off the microphone during a call, press and hold down the mute button.
- Release the button to resume the conversation.

**F**

## INSTALLATION

- Connectez la fiche jack (2.5 ou 3.5 mm) du CL Hook dans la prise casque de votre appareil audio.
- Placez le ou les crochet(s) autour de votre oreille.
- Basculez l'appareil auditif en mode T.
- Votre système est maintenant prêt à être utilisé.

### Note :

Les modèles 1, 5 et 6 incluent un microphone pour une utilisation en mains libres avec un téléphone.

- Pour couper ponctuellement le microphone en cours de communication, appuyez et maintenez le bouton «Secret».
- Pour rétablir la conversation, relâchez le bouton.



GEEMARC  
**CLEAR SOUND**  
 HEAR THE DIFFERENCE

**Hands free kit for users with T-coil**  
**Kit mains libres pour utilisateurs**  
**d'appareil auditif**

\*Model included  
 \*Modèle inclus

CL Hook1	
CL Hook2	
CL Hook3	
CL Hook4	
CL Hook5	
CL Hook6	

**Compatible with MP3 audio player,  
 audio CD ...  
 or telephones as per the model\*.  
 Compatible avec lecteur MP3, CD ...  
 ou téléphones suivant les modèles\*.**

See on the rear side for the complete description of the model included.  
 Voir à l'arrière pour la description complète du modèle inclus.

**CL Hook**

geemarc

www.geemarc.com

**CL Hook**

geemarc  
 www.geemarc.com

For product support and help :  
 44 (0)1707 384438  
 Tél. service après vente :  
 33 (0)3 28 58 75 99